

**VITAL RAYS**

ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫЙ

ИМПУЛЬСНЫЙ МАССАЖЕР

**ДЕАКСОН**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**DANA-7**



# Меры предосторожности



- Перед началом использования внимательно изучите инструкцию по эксплуатации
- Проверьте, стабильно ли напряжение в розетке
- Используйте только вилку, которая идет в комплекте
- Не включайте кабель питания в розетку при наличии на нем повреждений

## Характеристики и преимущества

- Большое количество встроенных уникальных программ, разработанных для применения при конкретных проблемах и потребностях
- Возможность обновления, изменения и установки новых программ
- Возможность воздействия на отдельные участки тела
- Особенности ощущения при разной частоте и интенсивности воздействия
- Возможность одновременного применения аппарата четырьмя пользователями
- Эффективность и быстрый результат
- Подходит для домашнего использования



# Дизайн и концепция

- Современный эргономичный дизайн
- Высококачественные материалы
- Легкость и компактность
- Качественная сборка, позволяющая собирать и разбирать аппарат за считанные минуты
- Простота и удобство в использовании
- Новинка в сфере технологий для заботы о красоте и здоровье



# Включение и начало использования

- Подключите необходимые наклейки к основному корпусу прибора
- Прикрепите наклейки на нужные участки тела
- Включите кабель питания в розетку
- Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» для включения прибора
- Выберите нужный режим и программу



## Пояс

- Миостимуляция (создается эффект акупрессуры)
- Возможность выбора необходимого уровня интенсивности, позволяющая подстроить процедуру под индивидуальные особенности организма пользователя
- Возможность воздействия на определенные участки тела
- Использование инновационных материалов, обеспечивающее высокую эффективность воздействия
- Специально разработанная и запатентованная компьютерная система, включающая множество различных программ воздействия на организм
- Эргономичный дизайн, способствующий получению максимального эффекта от использования



## Ножная панель

- Миостимуляция (создается эффект акупрессуры)
- Функция нагрева, обеспечивающая повышение эффективности воздействия
- Возможность выбора необходимого уровня интенсивности, позволяющая подстроить процедуру под индивидуальные особенности организма пользователя
- Возможность воздействия на разные органы тела при работе с определенными биологически активными точками на стопах
- Использование инновационных материалов, обеспечивающее высокую эффективность воздействия
- Специально разработанная и запатентованная компьютерная система, включающая множество различных программ воздействия на организм
- Конструкция, подходящая для стоп разного размера
- Высокопрочные материалы
- Стильный эргономичный дизайн
- Компактность, легкость и мобильность





# Высокоинтенсивный импульсный массажер «Деаксон»



Основной стенд



Системный корпус

## Технические характеристики

Наименование	<b>Высокоинтенсивный импульсный массажер "Деаксон"</b>
Модель	DANA-7
Питание	AC 220 V / 50 - 60 Hz / 60 W
Макс. сила импульса	10 mA (автоконтроль)
Размер системного корпуса	330(Д) × 250(Ш) × 60(В) мм
Размер ножной панели	350(Д) × 310(Ш) × 35(В) мм
Вес системного корпуса	2.1 кг
Вес всего комплекта	9 кг

## В комплекте:



Пульт управления



Пояс



Ножная панель



Накладки для рук



Универсальные накладки для тела

## Дополнительные накладки (не включены в комплект)



Накладки для коленей



Накладки для бедер



Накладки для рук



Накладка для работы с мочеполовой системой



Накладка для работы с репродуктивной системой



Накладка для шейного отдела



Накладки-банки



Накладка для лица


# Панель управления и дисплей



Регулятор



# Пульт управления и разъемы

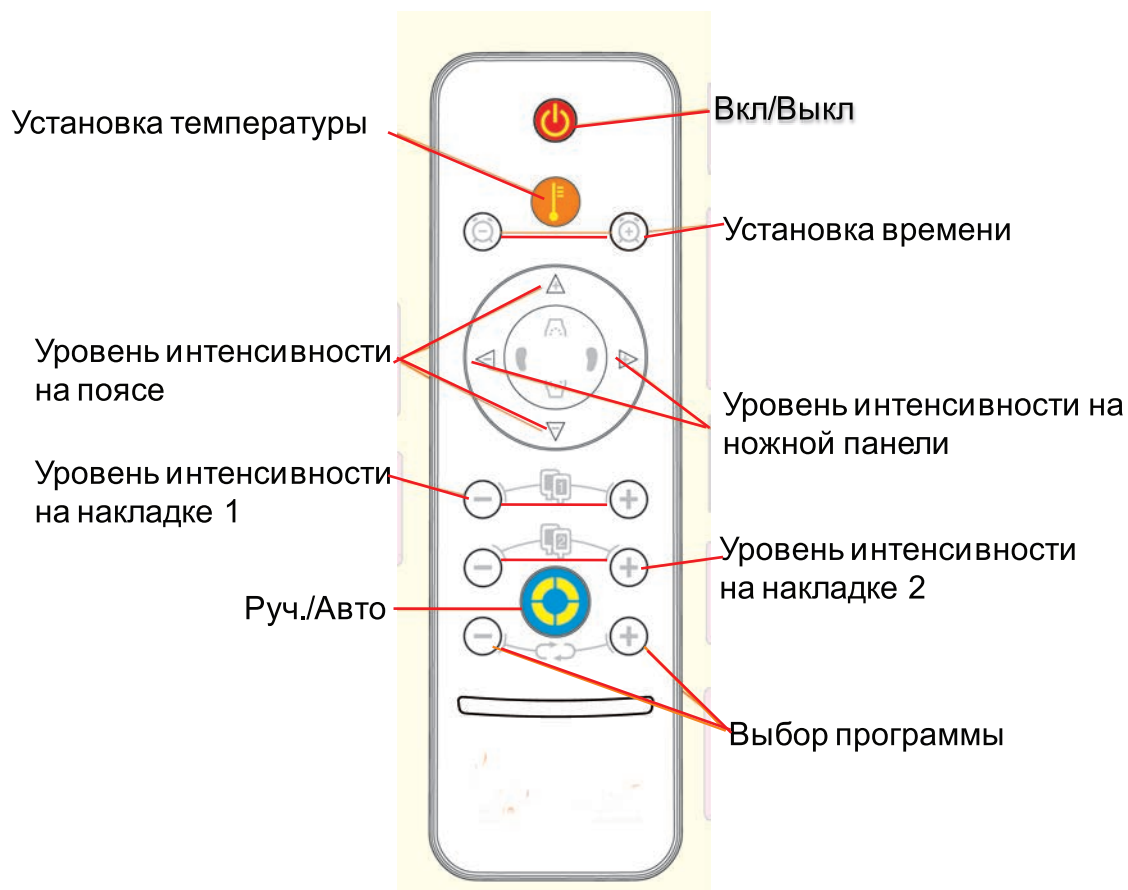

Выключатель



Разъем для сетевого кабеля

Разъем для ножной панели

Разъем для пояса



Разъемы для накладок

# Подключение аппарата

## 1. Подключение аппарата к сети

Вставьте в разъем на системном корпусе сетевой кабель и включите вилку в розетку



## 2. Подключение пояса

Вставьте кабель пояса в соответствующий разъем (как показано на картинке) и туго закрутите металлическое кольцо



## 3. Подключение ножной панели

Вставьте кабель ножной панели в соответствующий разъем (как показано на картинке)



## 4. Подключение универсальных накладок для тела

Вставьте кабель универсальных накладок для тела в один из разъемов, выделенных на картинке



# Подключение дополнительных накладок

## 1. Подключение накладки для работы с мочеполовой системой

Вставьте кабель накладки в разъем, как показано на картинке




## 2. Подключение других доп. накладок

Другие дополнительные накладки можно подключить в любой из выделенных на картинке разъемов



# Использование аппарата

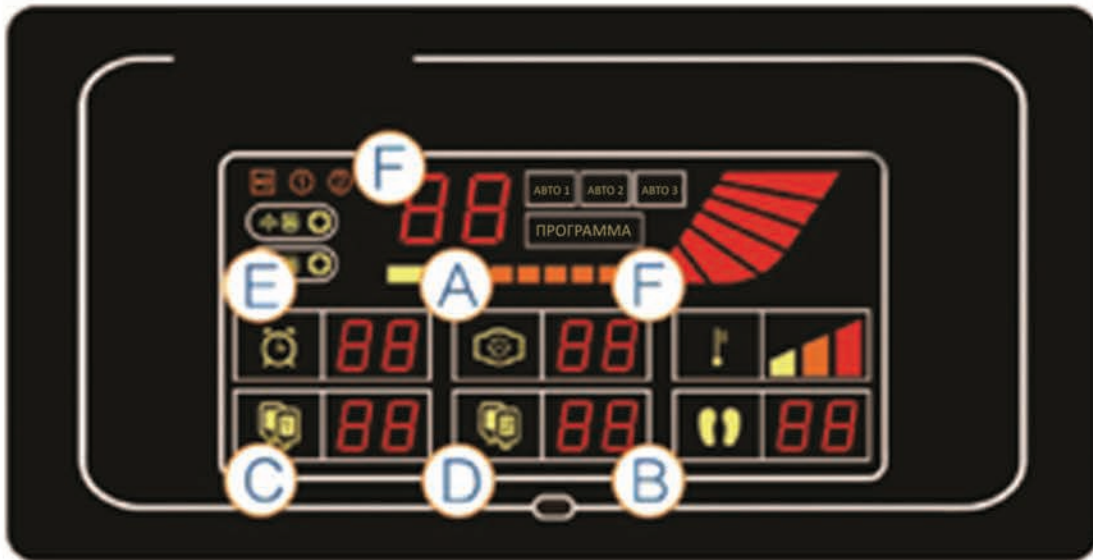



## Использование аппарата

- Подключите сетевой кабель прибора к электросети
- Включите аппарат с помощью выключателя, расположенного на системном корпусе, переведя его в положение «I»
- Нажмите на кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» (7) для включения
- Убедитесь, что все уровни интенсивности (A-D) в положении «00»
- Для работы с поясом нажмите на кнопку с его изображением (1), выберите уровень интенсивности от 1 до 20 с помощью регулятора. В соответствующем поле на дисплее (A) будет указана интенсивность
- Для работы с ножной панелью нажмите на кнопку с изображением стоп (2), выберите уровень интенсивности от 1 до 20 с помощью регулятора. В соответствующем поле на дисплее (B) будет указана интенсивность
- Для работы с универсальными накладками для тела или какими-либо дополнительными накладками, подключенными в разъем 1, нажмите на кнопку «накладка 1» (3), выберите уровень интенсивности от 1 до 20 с помощью регулятора. В соответствующем поле на дисплее (C) будет указана интенсивность
- Для работы с универсальными накладками или какими-либо дополнительными накладками, подключенными в разъем 2, нажмите на кнопку «накладка 2» (4), выберите уровень интенсивности от 1 до 20 с помощью регулятора. В соответствующем поле на дисплее (D) будет указана интенсивность
- Для установки времени процедуры нажмите на кнопку с изображением часов (5), выберите нужное время с помощью регулятора. В соответствующем окне на дисплее (E) отобразится время сеанса
- Для выбора температуры нагрева нажмите на кнопку с изображением термометра (6), с помощью регулятора выберите уровень: Н (высокий), М (средний) или L (низкий). В соответствующем окне на дисплее (F) отобразится температура

# Использование накладок

## ○ Пояс

Убедитесь, что кабель надежно подключен к аппарату. Приложите накладку к желаемой области и плотно зафиксируйте. Можно предварительно увлажнить накладку или нанести специальный гель.



## ○ Ножная панель

Убедитесь, что кабель надежно подключен к аппарату. Расположитесь таким образом, чтобы обе стопы плотно прилегали к накладке, полностью расслабьтесь. Можно предварительно увлажнить накладку или нанести специальный гель.




## ○ Универсальные и доп. накладки

Убедитесь, что кабель надежно подключен к аппарату. Приложите накладки к желаемой области и зафиксируйте их не слишком туго и не слишком слабо. Можно предварительно увлажнить накладки или нанести специальный гель.



## ○ Накладка для мочеполовой системы

Убедитесь, что кабель надежно подключен к аппарату. Поместите накладку на стул или другую твердую и ровную поверхность и сядьте так, чтобы тело плотно прилегало к накладке. Можно предварительно увлажнить накладку или нанести специальный гель.

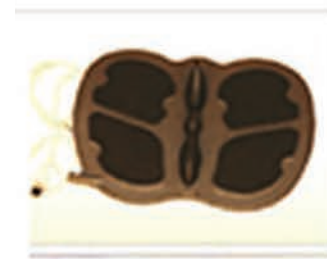

## Использование накладок

Способы применения универсальных накладок на разных частях тела и зоны воздействия



Талия



Колени



Бедра



Руки



Живот



Поясница



Плечи



Шея



Стопы



Икры

○ Использование пояса на разных частях тела



Бедра



Грудь



Талия



Живот



Руки



Плечи

## Установка времени и температуры



- Температуру следует выбрать перед началом сеанса
- Доступно три уровня температуры: L (низкий), M (средний) и H (высокий)
- Время может быть выставлено от 1 до 90 минут
- По окончании сеанса прозвучит звуковой сигнал, после чего аппарат автоматически выключится, и все заданные параметры вернуться в положение «00»

## Использование регулятора

- После нажатия любой кнопки («пояс», «ножная панель» и т.д.) можно изменить настройки, повернув регулятор
- Вы можете изменить настройки регулятором в течение 5 секунд после выбора параметра, по истечении этого времени кнопка перестанет мигать

## ВЫБОР РЕЖИМА

Вы можете выбрать необходимый режим, включив одну из программ:

- Авто 1: режимы 1-10
- Авто 2: режимы 11-20
- Авто 3: режимы 21-25

## Настройки Ручного/Авто режима

- Для выбора режима нажмите на кнопку «Ручной/Авто»
- Ручной режим позволяет использовать установленную программу без ограничений во времени
- Автоматический режим дает возможность пользоваться программами со встроенными режимами (например, при выборе «Авто 1» режимы 1-10 будут сменять друг друга автоматически)

## После использования

- По завершении использования выключите аппарат кнопкой «ВКЛ/ВЫКЛ» на панели управления, переведите выключатель, расположенный на системном корпусе аппарата, в положение «О» и вытащите сетевой кабель из розетки
- Протрите используемые накладки влажной салфеткой
- Делайте это регулярно, чтобы поддерживать аппарат в хорошем состоянии

## Замена батареек в пульте управления

- ① Нажмите на крышку и снимите ее, подвинув в направлении стрелки (см. рисунок ниже)
- ② Вставьте батарейки в соответствии со значками «+» и «-»



\*В пульте используются 2 батарейки АА

## Предупреждения на экране



- Индикаторы «Пояс» и «Ножная панель» не горят при нормальной работе аппарата. В случае отсутствия (нарушения) соединения соответствующей накладки с аппаратом индикатор загорится. Если после правильного подключения накладки к аппарату индикатор не погаснет, обратитесь в сервисный центр
- Если загорелся индикатор «температура» или «перегрев», аппарат автоматически отключает функцию нагрева (во избежание получения пользователем ожогов)

## Диагностика и решение проблем

В случае возникновения серьезной неисправности обратитесь в сервисный центр или в центр «Витал Райз»

Проблема	Действия для проверки	Способы решения
Аппарат не включается	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте выключатель на системном корпусе аппарата</li> <li>• Проверьте, включена ли вилка в розетку</li> <li>• Проверьте, включена ли кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ» на панели управления</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Приведите выключатель в положение «I» (включите)</li> <li>• Включите сетевой кабель в розетку</li> <li>• Нажмите на кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» для включения аппарата</li> </ul>
Пульт не работает	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте наличие и состояние батареек</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вставьте/замените батарейки</li> </ul>
Уровень интенсивности слишком слабый	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разные насадки могут иметь разный уровень интенсивности</li> <li>• Проверьте, правильно ли Вы расположили накладку (той ли стороной)</li> <li>• Проверьте, надежно ли подключен кабель накладки к аппарату</li> <li>• Проверьте, правильный ли уровень интенсивности Вы выбрали</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Восприятие интенсивности может зависеть от чувствительности отдельных зон тела, индивидуальных особенностей организма, состояния организма в момент проведения процедуры</li> <li>• Убедитесь, что накладки плотно прилегают к области воздействия</li> <li>• Убедитесь, что кабель накладки подключен к аппарату надежно</li> <li>• Выберите более высокий уровень интенсивности</li> </ul>
Болезненные ощущения во время процедуры (повышенная чувствительность)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте, правильный ли уровень интенсивности Вы выбрали</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выставьте более низкий уровень интенсивности</li> <li>• Попробуйте использовать специальный гель или увлажнять кожу в зоне воздействия</li> <li>• Если это не помогает, и во время использования Вы все равно чувствуете дискомфорт, обратитесь к специалистам «Витал Райз»</li> </ul>
Ножная панель не греет	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте, выставлена ли температура</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Установите нужную температуру с помощью регулятора, предварительно нажав на кнопку с изображением термометра</li> </ul>

## Противопоказания к использованию высокоинтенсивного импульсного массажера «Деаксон»



- **Перед использованием рекомендуется проконсультироваться со специалистами «Витал Райз» при:**
  - обострениях хронических заболеваний
  - повышенной температуре тела
  - заболеваниях сердца
  - психических нарушениях
  - беременности
  - злокачественных опухолях
  - раздражении кожи после использования
  - наличии протезов, искусственных органов, их частей
  
- **Запрещается использовать аппарат на следующих частях тела:**
  - глаза
  - половые органы
  - сердце
  - мозг
  - горло
  - уши
  - части тела, в которые были вшиты импланты
  - открытые раны
  - зубы
  - части тела с протезами
  
- При прохождении какого-либо курса лечения перед использованием аппарата необходимо проконсультироваться со специалистами «Витал Райз»
  
- При возникновении после процедуры повреждений на коже необходимо проконсультироваться со специалистами «Витал Райз»





## Детям



- Не позволяйте детям играть с аппаратом
- Не оставляйте детей рядом с аппаратом без присмотра
- Во избежание испуга, не включайте аппарат рядом с детьми
- Не позволяйте детям трогать кабели, так как повреждения на них могут привести к удару током или возгоранию
- После использования выключайте аппарат из розетки, чтобы дети не могли его включить



## Меры предосторожности



- Не вскрывайте аппарат самостоятельно (в случае повреждения при самостоятельном вскрытии аппарата компания может отказать в гарантийном обслуживании)
- Если аппарат функционирует неисправно, обратитесь к продавцу или в сервисный центр «Витал Райз»
- Не выставляйте сразу самый высокий уровень интенсивности
- Подберите подходящий Вам уровень интенсивности, ориентируясь на свои ощущения и чувствительность кожи
- Прекратите использование аппарата, если во время сеанса почувствуете сильный дискомфорт
- Берегите аппарат от ударов и механического воздействия
- Не перекручивайте шнуры
- Не используйте аппарат прямо на глаза
- Не используйте аппарат с аксессуарами других производителей
- Не используйте аппарат в помещениях с повышенной влажностью
- Используйте аппарат не более 3 раз в день с интервалами не менее 4 часов
- Не перемещайте аппарат во время сеанса



## Правила подключения к электросети



- Данный аппарат подключается к сети AC 90-260 V
- Используйте розетку с заземлением во избежание удара током
- Не дергайте вилку в розетке (это может привести к короткому замыканию)
- Не перекручивайте, не сгибайте и не натягивайте кабель питания
- Следите, чтобы в розетке не было посторонних предметов или мусора
- При возникновении повреждений аппарата из-за небрежного использования или физического воздействия компания не несет ответственности за неисправности
- Не включайте аппарат мокрыми руками
- В случае повреждения шнура обратитесь к продавцу или в сервисный центр «Витал Райз»
- Не используйте аппарат во время грозы



## Хранение



- Берегите аппарат от ударов
- Не подвергайте аппарат прямому воздействию солнечного света
- Избегайте контакта аппарата с легковоспламеняющимися веществами (например, с алкоголем). Это может вызвать пожар
- Помещайте аппарат только на ровные поверхности
- Держите аппарат в стороне от режущих предметов



## Использование аппарата



- Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя
- Не используйте вблизи водоемов и не помещайте жидкости на аппарат
- В случае попадания жидкости на аппарат немедленно отключите его
- Не оказывайте физическое давление и не становитесь на аппарат
- При неправильной работе немедленно выключите аппарат

## Уход



- После использования протирайте накладки влажной салфеткой
- Берегите аппарат от пыли и прямых лучей солнца
- Храните аппарат в помещении с комнатной температурой
- Берегите аппарат от ударов
- Компания не несет ответственности за механические повреждения при транспортировке или небрежном использовании аппарата
- Во время использования не наклоняйте и не переворачивайте аппарат
- После длительной паузы в использовании повторно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед применением
- Перед очисткой аппарата выключите его из розетки
- Протирайте аппарат от пыли только сухими мягкими салфетками, чтобы избежать появления царапин

## Высокоинтенсивный импульсный массажер «ДЕАКСОН»

- Данный аппарат сочетает в себе миостимуляцию и прогрев длинноволновым инфракрасным теплом. Это дает эффекты, аналогичные эффектам прижигания, акупунктуры и акупрессуры
- Воздействуя на организм, прибор положительно влияет на общее состояние здоровья, способствует омоложению организма, восстановлению его защитных функций, а также похудению
- Данный аппарат уникален и очень прост в использовании. Он подходит для домашнего применения всеми членами семьи

ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ МАССАЖЕР

# ДЕАКСОН



**EAC**

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗРАБОТКА  
ООО «ВИТАЛ РАЙЗ»/ VITAL RAYS, LLC  
350012 УЛ. КРУГОВАЯ, 26, г.КРАСНОДАР  
350012, KRUGOVAYA STR. 26, KRASNODAR, RUSSIA  
ИЗГОТОВЛЕНО В ZHEJIANG MEDICINES & HEALTH  
PRODUCTS I/E CO.,LTD. ZMC BUILDING, 101-2.N.ZHONGSHAN ROAD,  
HAGNZHOU, 31000